

# APC Flash-Free

Брекеты с нанесенным адгезивом



# Революция в адгезивных технологиях

## Инновации 3M Unitek для защиты эмали

Брекеты, произведенные по запатентованной технологии APC Flash-Free, защищают эмаль от воздействия кислоты как под опорной площадкой, так и до 2 мм по ее периметру. Новая адгезивная система доступна только на брекетах 3M Unitek.

- Защита эмали от воздействия кислоты
- Не нужно удалять излишки адгезива
- Низкая частота самопроизвольного дебондинга (<2%)
- Более легкое снятие брекетов и удаление остатков клея



CLARITY | ADVANCED  
advanced ceramic brackets



CLARITY | SL  
SELF-LIGHTING APPLIANCE SYSTEM



SMARTCLIP  
SELF-LIGHTING APPLIANCE SYSTEM



Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов:  
APC Кларити Адванст (APC Clarity Advanced), APC СмартКлип (APC SmartClip),  
APC Кларити SL (APC Clarity SL).

№ ФСЗ 2011/10238

Не нужно удалять излишки адгезива

Надежная и предсказуемая фиксация

Защита эмали от кислоты

Более легкое удаление остатков клея

Брекеты фиксируются до 40% быстрее

Меньше количество этапов фиксации

Забудьте про удаление излишков адгезива!



С APC Flash-Free не нужно удалять излишки адгезива<sup>1</sup>



Привычное удаление излишков адгезива

Частота самопроизвольного дебондинга < 2%<sup>3</sup>

Самопроизвольный дебондинг

Надежная и предсказуемая фиксация

Зафиксированные брекет

Результаты тестирования 42 врачами-ортодонтами из США, Австрии и Европы. Произведена фиксация 1997 брекетов в 2012–2013 гг.

С APC Flash-Free фиксация быстрее на 40%<sup>2</sup>

Среднее время фиксации одного брекета, секунды




Данные получены от первых пользователей продукта. Под временем фиксации подразумевается позиционирование брекета и удаления излишков адгезива.


Всего 5 шагов для успешной фиксации<sup>4</sup>

Этапы фиксации

Система APC Flash-Free = 5 этапов

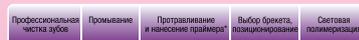

Традиционная светополимеризующая фиксация = 11 этапов

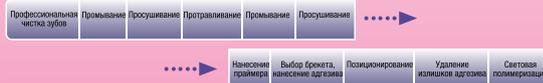

\* При использовании самопротравливающего праймера Transbond Plus SEP

Ссылки:

- 1 3M Unitek Data, REF S10497, March 2013
- 2 3M Unitek Data, REF S10659, S10489, March 2013
- 3 3M Unitek Data, REF S10635, March 2013
- 4 3M Unitek Data, REF S10634, March 2013



Ортодонтическая продукция

3M Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 (495) 784 7474

Тел.: +7 (800) 250 84 74 (звонок бесплатный)

Факс: +7 (495) 784 7475

www.3MUnitek.ru